



Includal® ANTISEPT

Desinfektion von Flächen und Gegenständen
in allen Betriebsbereichen



Eigenschaften / Anwendungsgebiete:

INCLUDAL® ANTISEPT ist ein Desinfektionsmittel für Flächen und Gegenstände mit antibakterieller und antimykotischer Wirkung. Ein feiner Sprühnebel legt sich auf die zu desinfizierenden Gegenstände, der eine gleichmäßige Verteilung der Wirkstofflösung bis in schwer zugängliche Ecken, Einbuchtungen und Falten ermöglicht. INCLUDAL® ANTISEPT verhält sich gegenüber alkoholbeständigen Materialien und Gegenständen völlig indifferent, trocknet rasch und hinterlässt auf den behandelten Stellen keine Rückstände.

INCLUDAL® ANTISEPT verfügt über eine gute Wirksamkeit gegenüber Bakterien und Viren, insbesondere in Umkleide- und Behandlungsräumen. Beispiele: Toiletten, Türgriffe, Telefonhörer, Spinde, Schutzmasken.

Gelistet: VAH (Verband für Angewandte Hygiene), ÖGHMP (Österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin), IHO (Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz).

Wirkungsspektrum:

INCLUDAL® ANTISEPT wirkt: bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, fungizid (*C. albicans*), levurozid, begrenzt viruzid PLUS gemäß RKI/DVV (inkl. Vaccinia-, BVDV, HBV, HIV, HCV, sowie Influenza-/Grippe-Viren).

Dosierung / Anwendungshinweise:

Gegenstände und Flächen aus mindestens 30 cm Entfernung bis zur vollständigen Benetzung besprühen und ggf. nach Ablauf der Einwirkzeit mit einem Einmaltuch nachwischen.

Nichtklimatisierte Räume nach Desinfektion lüften. Für Acrylglas und andere alkoholempfindliche Flächen, Lacke, geölte Holzflächen, etc. nicht einsetzbar. Bei empfindlichen Flächen ggf.

Beständigkeitsprobe an unauffälliger Stelle vornehmen.

Einwirkzeiten:

Wirksamkeit und Prüfmethode	30 sek	1 min	3 min	5 min
-----------------------------	--------	-------	-------	-------

Bakterien und Hefen				
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid	VAH / EN 16615	Mit Mechanik, hohe Belastung		●
Tuberkulozid (<i>M.terrae</i>)	EN 14348	Niedrige Belastung	●	
Mykobakterizid (<i>M.avium</i> und <i>M. terrae</i>)	EN 14348	Niedrige Belastung		●

Viren						
Begrenzt viruzid	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/HCV	●			
Begrenzt viruzid PLUS	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/HCV			●	
Wirksam gegen Rotaviren	EN 14476	Niedrige Belastung	●			
Wirksam gegen Adenoviren	EN 14476	Niedrige Belastung			●	
Wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	Niedrige Belastung		●		

Produktbeschreibung:

Klare, farblose, alkoholische (ca. 45 %) Lösung, parfümfrei

Lagerungshinweise:

INCLUDAL® ANTISEPT ist in originalverschlossenen Gebinden bei Raumtemperatur lagerfähig. Das jeweilige Haltbarkeitsdatum ist auf der Verpackung angegeben.

Gesetzliche Vorschriften:

INCLUDAL® ANTISEPT ist ein Biozid gemäß der Biozidprodukte-Verordnung (BPR).

baua: Reg.-Nr. N-44075, Reg.-Nr. N-44076

Ein EG-Sicherheitsdatenblatt liegt vor. Dieses kann unter www.myxal.de heruntergeladen werden.

Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinien:

Achtung: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Zusammensetzung:

100 g INCLUDAL® ANTISEPT enthalten 45,0 g Ethanol.

Bestelldaten INCLUDAL® ANTISEPT:

250-ml-Pumpspray

PZN 3854240

BSW-Nr.: 13785001

10 x 250-ml-Pumpspray = 1 VE¹⁾

¹⁾VE = Verpackungseinheit

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Unsere Angaben und Empfehlungen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Erkenntnisse. Wir erteilen sie unverbindlich. Sie stellen weder eine Garantie dar noch wird hierdurch ein Vertragsverhältnis begründet. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der Produktweiterentwicklung behalten wir uns vor. Wir bitten Sie, die Produkte stets selbst auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen.

Peter Greven Physioderm GmbH

Procter-&-Gamble-Str. 26

53881 Euskirchen

Fon: 02251/77617-0

Fax: 02251/77617-44

Internet: www.myxal.de

E-Mail: info@pgp-hautschutz.de